




ALPHA COOLING®
WEGWEISER

von Aufstellen bis Zehnerkarte



GERMAN
CRYO GROUP

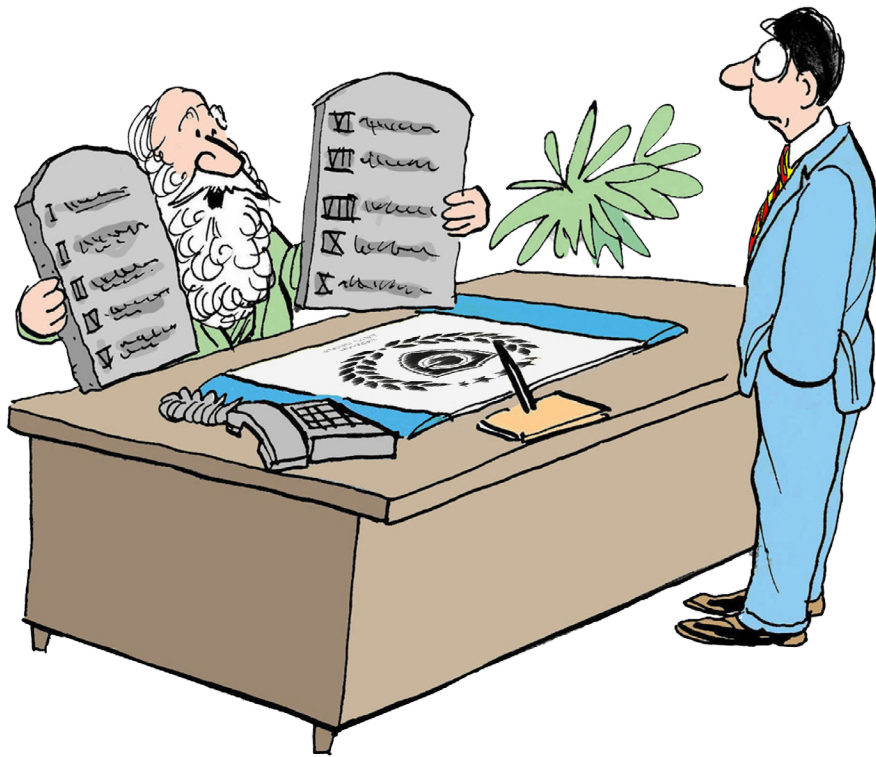

*„Bei uns gibt's nur ein paar Gebote.
Aber die nehmen wir sehr ernst.“*

- I.
Je mehr Probanden pro
Tag, umso mehr Kunden
- II.
Je stärker der Schmerz,
umso größer der Erfolg für
Patient und Anbieter
- III.
Menschen mit wenig
Schmerzen oder kleinen
Leiden verursachen nur
Kosten, aber kaum Erträge

Dem.



ALPHA COOLING®
PROFESSIONAL

Erste Schritte

Stellplatz auswählen




 Popup Aufbauanleitung
www.alphacooling.de/pa

- **Praxen** steigern die Anfragen nach Probeterminen immens, wenn ACP in Sichtweite des Wartezimmers platziert wird.
- **Studios** erzielen den besten Effekt, wenn ACP separat und prominent gestellt wird - bitte nicht auf der allgemeinen Trainingsfläche.
- **Grundsätzlich** empfiehlt es sich, ACP als Eycatcher in Szene zu setzen, für sich wirkend.



ACP im Eingangsbereich der Praxis Dr. Wolfram

Inbetriebnahme

Deckel öffnen, Stromkabel einstecken.
ACP geht selbständig in Betriebsvorbereitung. Nach 2 Minuten ist ACP startklar, sobald alle Timer-Dots permanent leuchten.

Transport

Nach dem Zuklappen

abschließen und sicherstellen, dass das Schloss eingerastet ist. Damit kann sich der Deckel beim Transport nicht versehentlich öffnen.

Pflege, Hygiene

Kühlkörper / Handauflageflächen nach jedem Anwender mit einem weichen Tuch oder Zellstoff von Kondenswasser befreien und desinfizieren.

Membran

Die Membranen müssen den Unterarm gut umschließen. Es besteht die Möglichkeit, die Hand zuerst weiter einzuschieben und dann auf Position zurückzuführen, damit die Membrane besser anliegen kann. Sollte dennoch ein Lichtschlitz zwischen Arm und Membrane sichtbar sein, muss die Membrane ausgetauscht werden.





Schulung im Aktiv Gesundheitszentrum, Springe

Teamschulung & Probedurchläufe

Wie ACP anzuwenden ist, wird in der Teamschulung mit Probedurchläufen gelernt. **In der täglichen Praxis muss es einen Mitarbeiter geben, der ACP fokussiert betreibt.** Nur so entstehen großartige Ergebnisse.

Wie der ideale Ersttermin mit Aufklärung über Kontraindikationen & Erklärung der Wirkweise abläuft und wie der 10-er Kartenverkauf klappt, gehört ebenfalls zum wichtigen Standard-Repertoire. Siehe Seite 14.

Bekannt machen

Betreiber nutzen ihren Mitgliederstamm, um die Botschaft gleich zu Anfang explosiv zu verbreiten. Newsletter, Flipchart im Eingang, Gutscheiverteilung (mit Ablaufdatum 1-2 Wochen) und Social Media sind die erste Wahl. Ein Aufruf zu einer internen Studie, z. B. speziell für Rheuma-Patienten kann ebenfalls sehr effektiv sein. **Video-Anleitung für wirkungsvolle Social Media Posts in der Academy.**

Wichtig: Kooperationen mit Praxen, Heilpraktikern, Apotheken...!

Zeitungsberichte

Ein redaktioneller Bericht über den Einsatz der revolutionären Kältebehandlung mit ACP kann über Nacht Ströme von Neukundenterminen auslösen.

Hat der Redakteur des lokalen Zeitungsverlages chronische Schmerzen? Eine freundliche Einladung zum kostenfreien Test kann die Sache ins Rollen bringen.

Achtung! Werbeanzeigen sind keine gute Investition.

Weg mit den Schmerzen!

Wir suchen **18** Mitglieder mit starken Schmerzen

Nicht rauchgeden

Live Event mit Entwickler Markus Deussl

Freitag, 6. Mai 10-11 Uhr

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 <u>Sabine</u> | 9 <u>Julia Senah</u> |
| 2 <u>Tatjana</u> | 10 <u>E. J. Warnecke</u> |
| 3 <u>Elfi Roebing</u> | 11 <u>Hanna Neumann Frau</u> |
| 4 <u>Claudia Wiede</u> | 12 <u>Glinter</u> |
| 5 <u>Regina Wellhansen</u> | 13 <u>Christa</u> 17 |
| 6 <u>Monika</u> | 14 <u>Sanku</u> |
| 7 <u>Ronde</u> | 15 <u>Marion k.</u> 18 |
| 8 <u>_____ Bisbirt/Nonika</u> | 16 <u>_____</u> |





Redaktionell is King

Bericht links: Redakteurin S. Böck wurde online auf Familie Holzer aufmerksam und kam zum Testen. Nachdem ihre Beschwerden verschwanden, schrieb sie begeistert ihren Bericht, der in der Schwäbischen Zeitung veröffentlicht wurde.

Ergebnis: 20 Neukundentermine pro Tag für Vitalpunkt Holzer, begeisterte Klienten und ein Videodreh mit dem lokalen TV-Sender, was weitere Anfragen brachte.

Bericht rechts: Personaltrainer Sven Höveler in „Die Glocke“. Ergebnis: 50 Neukundentermine. Seitdem wochen im Voraus ausgebucht.



Beckum: Eisige Hände helfen Schmerzen zu bekämpfen

Das „Alpha-Cooling“-Gerät gibt es nur ein Mal in NRW. Es soll unter anderem bei Migräne oder Rheuma helfen.



Kältetherapie bei vier Grad: Sven Höveler zeigt der „Glocke“, wie sein Gerät funktioniert. Es soll bei den Krankheitsbildern Migräne, Rheuma oder anderen Schmerzen helfen. Foto: Wedel

Beckum (nwl) - Fünfmal zwei Minuten die Handflächen bei vier Grad frieren lassen und die Schmerzen sind weg oder gelindert? Das soll funktionieren? „Ja“, antwortet Sven Höveler. „Ich war auch anfangs skeptisch. Doch die Erfahrung zeigt, dass es funktioniert.“

Bereits mehr als 3000 Anwendungen


„Alpha Cooling Professional“: Eine Erfindung aus der Heimat



„Alpha Cooling Professional“: Eine Erfindung aus der Heimat

Nach dem Prinzip „Ärmel hoch, Hände rein, Schmerz weg“ soll eine Erfindung aus dem Allgäu für Wohlbefinden sorgen. Die Innovation, also das sogenannte „Alpha Cooling Professional“, kurz ACP wurde ursprünglich entwickelt um die Leistung zu steigern und im Sport schnell zu regenerieren. Nach vielen Tests hat sich dann aber herausgestellt, dass nicht nur die Muskeln schnell wieder fit und leistungsfähig werden, sondern auch Schmerzen fast vollkommen verschwinden. Klingt zu schön um wahr zu sein? Das hat sich auch unsere Reporterin Sarah Rahm gedacht und die Innovation einfach mal selbst getestet. Wie sich das angefühlt hat und wie so etwas überhaupt funktionieren kann? Wir waren dabei.

AlphaCoolingProfessional Kältetherapie muskeln regeneration Sarah Rahm Schmerzen sport



Downloads und Links zu den Zeitungsartikeln, Videobereichte, E-Learning, Tipps von unseren Top-Betreibern und vieles mehr in der Alpha Cooling® ACADEMY.

www.alphacooling.de/academy



GERMAN
CITY GROUP

HEINO & HANNELORE | ALPHA COOLING®





Probetermin-Ablauf mit Thomas Holzer

www.alphacooling.de/th



Der perfekte Probetermin



www.alphacooling.de/sh

Probetermin-Ablauf mit Sven Höveler



Strukturierter Ablauf eines Probetermins

Nachfolgend listen wir Kern-Elemente auf, die fester Bestandteil eines jeden ACP-Probetermins sind.

1. Vorgespräch mit Eingangfragen
2. Erklärung Wirkweise ACP
3. Aufklärung über Kontraindikationen & Erstverschlimmerung
4. Ausfüllen des Analysebogens
5. Anwendung, 5 Zyklen
6. Nachbesprechung a) mit Restausfüllen der Schmerzskala, oder
7. Nachbesprechung b) Schmerzskala erst am nächsten Tag telefonisch
8. Immer: Telefonisch nachfassen am nächsten Tag zur Abfrage der Schlafqualität, Schmerzentwicklung und zur Besprechung der weiteren Vorgehensweise

Dass ein jeder Betreiber individuelle Nuancen seiner Persönlichkeit in die Beratung seiner Klienten einfließen lässt, ist selbstverständlich und wünschenswert.


Selbst im Angebot kann es Unterschiede geben, wie nebenstehende Video-Anleitungen veranschaulichen.

Nur 10er-Karten? Auch Einzelanwendungen, 5er und 10er-Karten? Jeder Betreiber entscheidet, was zu ihm und seinen Klienten passt.

Pflichtprogramm

Analysebogen: Schmerzpunkte

Auf der 2. Seite des Analysebogens sollten alle Problemstellen des Patienten markiert werden - auch die akzeptierten Alltagsschmerzen.

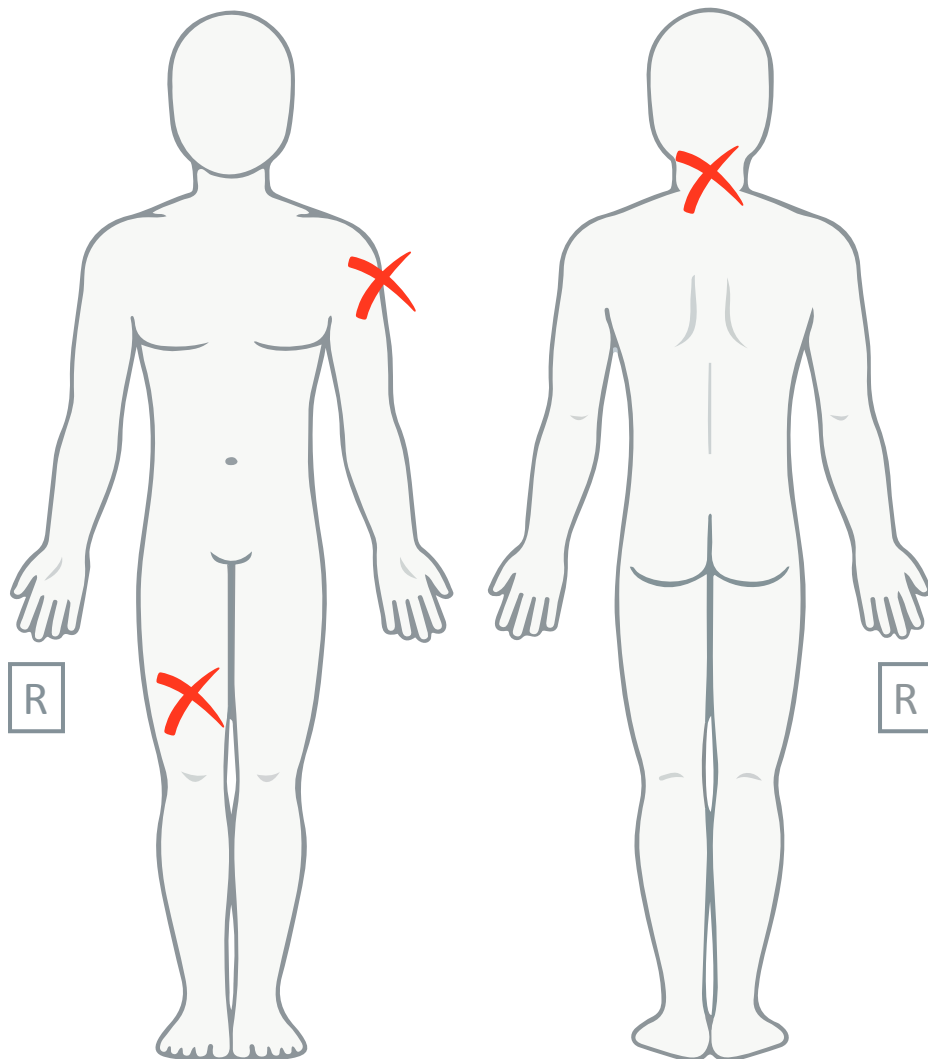

Akzeptierter Alltagsschmerz

Hierbei geht es um die „normalen“ Alltagsschmerzen, z. B. wenn der Rücken ab und zu zwickt und der Nacken-/Schulterbereich verspannt ist.

Genau diese Punkte müssen ebenfalls abgefragt und angekreuzt werden. Der Hintergrund ist folgender:

Der Kunde bucht einen Probetermin wegen seiner Schmerzen im Knie.

Szenario 1

Kunde kreuzt nur das Knie an.

→ Keine Veränderung am Knie → **ACP hilft nicht?**


Szenario 2

Kunde macht sich akzeptierte Alltagsschmerzen und Schlaflosigkeit bewusst und setzt mehrere Markierungen in die Skizze.

→ Keine Veränderung am Knie → andere Problempunkte sind jetzt allerdings schmerzfrei → am nächsten Tag stellt er außerdem fest, dass er besser geschlafen hat → **ACP hilft!**

Spürt der Klient vor der ersten Anwendung bewusst in sich hinein und macht sich seine Schmerzen bewusst, ist die Chance um ein Vielfaches größer, dass er eine Linderung wahrnimmt und Anwendungen kauft.

Bei der nächsten Kontaktaufnahme mit dem Patienten - **1 Tag nach dem Probetermin** - werden seine Problempunkte nochmals Punkt für Punkt abgefragt. Das Telefonat wird mit dem Patienten schon während des Probetermins vereinbart.

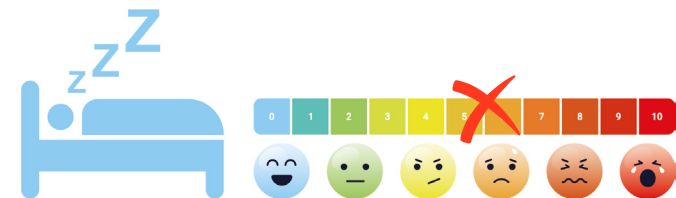



Erklärung Wirkweise

Kälteanwendung. Die Kälte wird zwar von außen zugeführt, gekühlt wird mit ACP jedoch von innen - da wo die Kälte auch hin soll. Hierfür werden die Hände als Wärmetauscher verwendet.

Zu den größten Wärmetauschern des Körpers gehören die Handflächen. Wir nutzen sie, um zu erreichen, dass gekühltes Blut von dortaus in den Organismus gelangt: Die Körperkerntemperatur wird damit um bis zu 1,5 Grad gesenkt, was mehr als ausreichend ist, um die förderlichen, körpereigenen Prozesse zu aktivieren.

Den Kühleffekt über die Handfläche erforschte die Stanford University in einer Studie zur Regeneration und Leistungssteigerung.

Damit dies mit ACP umgesetzt werden kann, wird in den Kammern **Unterdruck** erzeugt. Dadurch bleiben die Kapillaren, Venen und Arterien geöffnet und das kühle Blut kann in den Organismus gelangen und zirkulieren.

Ohne Unterdruck würden sich die Kapillaren durch die Kälte verschließen und das gekühlte Blut würde nicht im Körper zirkulieren (Blutstau). Jeder kennt das Phänomen vom Halten eines Schneeballs in bloßer Hand, verbunden mit einem schmerzhaften Pochen danach.

Das durch ACP gekühlte Blut zirkuliert binnen 60 Sekunden durch den gesamten Körper. Entzündungshemmende Prozesse werden angestoßen, die körperliche Belastbarkeit wird gesteigert.

Weiterhin findet eine Ausschüttung von Endorphinen und Dopamin statt, körpereigene Botenstoffe werden aktiviert und das sogenannte „Not Immunsystem“ schaltet sich ein. Siehe www.alphacooling.de/ni.


Schmerzen können gelindert - und Verspannungen gelöst werden.

Im Gegensatz zum Eisbad oder der Kryo-Sauna arbeitet ACP von innen nach außen. Der Vorteil: die Temperatur ist von Beginn an dort, wo sie sein soll und muss nicht erst diverse Haut- und Fettschichten durchdringen, weshalb Kältekammern auf etwa -120° Grad Kälte eingestellt werden müssen.

ACP ist hingegen schonend zur Haut mit gerade einmal +4° Grad, die effektiv auf die Handfläche einwirken.

Erstverschlimmerung

Don't Panic. Ist natürlich.

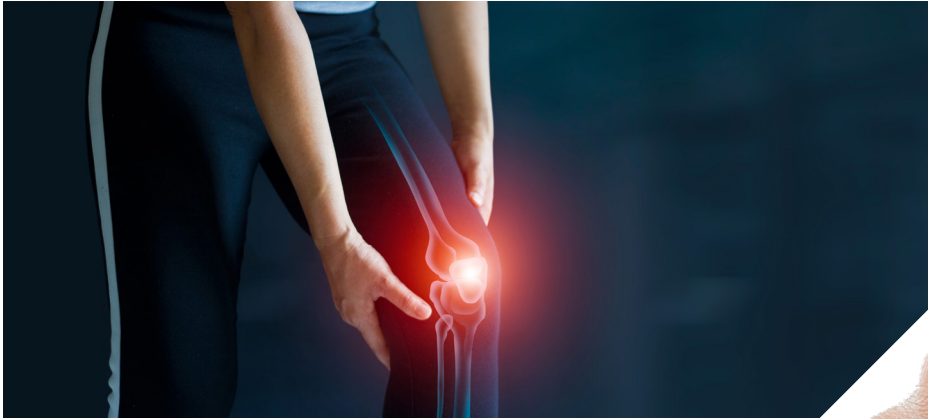

In einigen Fällen kann es nach der Anwendung mit ACP zu einer Erstverschlimmerung der vorhandenen Krankheitssymptome und Schmerzen kommen. Es handelt sich hierbei um eine überschießende Reaktion, die natürlich ist.

Sie ist die Antwort des Organismus auf den gesetzten Reiz und ein Zeichen dafür, dass der Körper nun arbeitet. Die Erstverschlimmerung kann Stunden oder bis zu zwei Tage anhalten und ist erst einmal ein gutes Signal.

Ein Abbrechen der Behandlung ist nicht angezeigt - in den meisten, von unseren Betreibern dokumentierten Fällen, lohnt sich der Gang durch den Prozess allemal! In der Regel erfahren die Patienten hinterher eine deutliche Linderung ihrer Beschwerden im Vergleich zum Zustand vor der ersten ACP-Anwendung.

Tritt keine Erstverschlimmerung ein, bedeutet dies im Umkehrschluss natürlich nicht, dass die Anwendung nicht anschlägt.

Erstverschlimmerungen sind übrigens von einigen alternativen Heilmethoden bekannt, u. a. von der Akupunktur und Osteopathie.





Häufige Anwenderfragen und Antworten.

Wann setzt die Wirkung ein?

Wenn „Kälte“ bei Ihnen angezeigt ist, spüren Sie den Effekt entweder sofort oder innerhalb 1 Stunde. Ein kleiner Teil der Anwender spürt eine Verbesserung erst am nächsten Tag.

Wie oft „muss“ ich ACP anwenden?

Die ärztliche Empfehlung für nachhaltige Effekte deckt sich mit den Praxiserfahrungen unserer Betreiber.

10 Anwendungstermine à 3 x 2 Minuten.

3 - 4 Termine in Woche 1

2 - 3 Termine in Woche 2

1 - 2 Termine pro Woche nach Bedarf

Wie lange hält die Schmerzlinderung an?

Individuell sehr unterschiedlich. Mehrere Stunden, Tage, Wochen und Monate sind möglich. Bei manchen Patienten kam der Schmerz nach nur einem Probetermin nie wieder.

Deshalb: Kostenfrei testen und Körperreaktion beobachten.

Empfehlung: Innerhalb einer 10er Karte den individuell perfekten Behandlungsabstand ermitteln.

Gibt es bekannte Nebenwirkungen?

Nicht im Sinne einer schädlichen Wirkung. Eine Erstverschlimmerung bei etwa 20% der Anwender ist zu beobachten. Wenige Menschen berichten darüber, dass ihnen bis zu 4 Stunden nach der Behandlung kalt ist.

Wie oft direkt hintereinander darf ich ACP anwenden?

Mit +4°Grad ist ACP schonend zur Haut. Es bestehen keine Risiken (Verletzungen, etc.), die man etwa mit Kryokammern in Verbindung bringt.

10 oder mehr Anwendungen hintereinander sind deshalb unbedenklich, jedoch, Stand der Dinge, nicht unbedingt wirksamer als 5 bis 8 Anwendungen.



Gute Laune bei Buchautor Bernd Hüfner, Salon Angela Larsen Mallorca

Fast zu einfach. Bitte beachten!

- Ringe, Uhren, Armbänder... runter
- Linke Hand zuerst einführen, um genügend Zeit zur Erklärung der korrekten Handposition zu haben
- Handposition auch bei folgenden Durchgängen immer wieder prüfen
- Ellenbogen... ablegen
- Handgelenk muss perfekt von der Membran umschlossen werden - kein Luftschlitz sichtbar!
- Als einweisende Person stehen oder sitzen wir während der Behandlung rechts oder links neben dem Gerät, sichtbar VOR dem Patienten. NIEMALS direkt neben - oder hinter ihm. Dies verhindert, dass der Patient seinen Kopf in eine extreme Richtung drehen muss, was meist mit einer Änderung der gesamten Körperhaltung einhergeht und Luftschlitze zwischen Haut und Membran bildet!
- Hände... locker auflegen
- Temperatur darf sich sehr kalt anfühlen - bei Kälteschmerz den Aufgedruck der Handfläche verringern



Psychologie

Eiskalte Überraschungen sind nicht immer mit einem Lächeln verbunden. Deshalb sollten Patienten schon im Vorgespräch über mögliche Erstverschlimmerungen, siehe Seite 20, aufgeklärt werden.

Außerdem spricht vieles dafür, während des Probetermins immer wieder die **nachhaltige Behandlung**, bestehend aus 10 Terminen anzusprechen. Auch die Preise sollten klar benannt werden. 10er-Karten werden so häufiger angefragt und der Erfolg für viele Patienten wird dadurch nachweislich gesteigert und bleibt von längerer Dauer. Ein Erfolg für alle!

Und bitte: ACP ist nicht „der Cooler“ oder „das Ding“. Bleiben wir hochwertig in der Sprache, folgt uns die Wertschätzung.

Sie kennen Regel Nr. III:

„Menschen mit wenig Schmerzen oder kleinen Leiden verursachen nur Kosten, aber kaum Erträge.“

Hingegen Menschen mit großem Leidensdruck verursachen

G Ä N S E H A U T !

Sorgen Sie von Anfang an für Gänsehautmomente. Gerade am Tag der Teamschulung, wenn alle Mitarbeiter versammelt sind!

Laden Sie an diesem Tag etwa 20 Schmerzpatienten mit hohem Leidensdruck ein (Seite 8). Nur Härtefälle. Menschen, die seit Jahren von Klinik zu Klinik laufen und vergeblich nach Linderung ihrer starken Beschwerden suchen!

Denn: „**Je stärker der Schmerz, umso größer der Erfolg.**“ Regel Nr. II.

Umso größer der Gänsehautmoment!

Warum ist das wichtig?

Wenn der erste Patient nach wenigen Minuten Behandlung aufsteht, glänzende Augen bekommt und sich Freudentränen ihren Weg bahnen, ist dies ein Schlüsselmoment! Sowohl für den Patienten selbst, als auch für die umstehenden Patienten und das gesamte Team.

Die Empfehlungsquote steigt sprunghaft, die Neugier auf die sanfte ALPHA-Methode steigt und das Team erhält einen wichtigen Selbstbewusstseinsschub und Motivation, ACP-Anwendungen aktiv anzubieten.

Resultat: Viele Probeterminale, viele neue und dankbare Kunden.

Klar: „**Je mehr Probanden pro Tag, umso mehr Kunden.**“ Regel Nr. I.

Gänsehaut. Denken Sie immer daran, auch nach dem Einschulungstag.

Viel Freude dabei!

Erfahrungsberichte

In welchen Fällen ACP anzuwenden ist, haben wir bereits formuliert. Doch immer wieder kommen neue Berichte aus der Praxis hinzu, die wir nachfolgend besonders erwähnenswert finden, auch was die Erfolgsquote betrifft. Ein Probetermin für Betroffene ist einen Versuch wert.

Lipödem

Hinweis von Dr. med. Martin Oechler. Beim Lipödem handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung letztlich unbekannter Ursache, die ausschließlich bei Frauen auftritt, unabhängig von etwaigem Übergewicht.

Neben dem störenden kosmetischen Bild leiden die betroffenen Frauen häufig unter Schmerzen, die v.a. durch Wasseransammlung im Fettgewebe und dem damit einhergehenden Druck auf Muskeln und Nerven verursacht werden.

Kältetherapie mit ACP zeigt Erfolge bei betroffenen Frauen. Offensichtlich zeigt die moderate Senkung der Körperkerntemperatur Wirkung auf die kleinen Gefäße und regt die Wasserausscheidung an, was die Schmerzen ebenso lindern kann wie eine direkte schmerzstillende Wirkung auf die betroffene Nerven. ACP ist damit eine vielversprechende Anwendung bei dem ansonsten therapeutisch nur schwer zugänglichen Krankheitsbild.

Post-Covid

Erfahrungsbericht Vitalpunkt Holzer. Stellvertretend für mehrere Rückmeldungen und Erfolge ihrer Klienten:

„Ich litt seit meiner Covid19-Erkrankung über 6 Monate dauerhaft an heftigen Gelenk-, Glieder- und Muskelschmerzen in beiden Beinen. Die verordneten Schmerzmittel (IBU 400/600) und weitere verordnete Anwendungen haben keine Linderung gebracht. Durch meinen Physiotherapeuten wurde ich auf die ACP-Behandlung aufmerksam gemacht.“

Nach 2 Woche sind die Schmerzen vollständig weg. Ich genieße die Zeit ohne Schmerzmittel und kann endlich wieder durchschlafen. Erlittene stärkere Blutergüsse und Prellungen aus sportlichen Verletzungen heilen Dank ACP deutlich schneller als bisher ab.“

Fibromyalgie

Aufgrund Berichten mehrerer Betreiber. Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung und verursacht Schmerzen in unterschiedlichen Körperregionen, meist in der Nähe von Gelenken und in Muskeln.

Beobachtet wurden zahlreiche Erfolge in ca. 70% der Fälle. Oftmals trat eine Schmerzlinderung bereits während des Probetermins ein, bis hin zur Schmerzfreiheit z. B. im gesamten Rücken.

Migräne

Aufgrund Berichten mehrerer Betreiber. Migräne ist in unserer Standardliste schon aufgeführt. 2 Besonderheiten hierzu:

Je nachdem, wodurch die Migräne-Attacke ausgelöst wird, kann ACP im Akut-Zustand helfen. Betreiber berichten, dass Betroffene während der Attacke ihre Beschwerden mit ACP losgeworden sind.

Durch die regelmäßige Anwendung von ACP 1x/Woche konnten die Abstände zwischen Migräne-Attacken bei Patienten deutlich verlängert und sogar vollständig vermieden werden.

Blasenentzündung

Bisher einmaliger Fall. Patientin hatte eine akute Blasenentzündung mit Blut im Urin und starken Schmerzen beim Wasserlassen und im Unterleib. Der Hausarzt verschrieb ihr ein Antibiotikum, sie sollte es am Abend einnehmen.

Wir testeten sofort ACP. 5x2 Minuten. Die Symptome verschwanden innerhalb von 30 Minuten zu 90%. Ohne Antibiotikum.

Sie möchten Ihre Berichte mit uns teilen?

Veröffentlichen Sie Ihre Erfolge auf Social Media und erwähnen Sie uns dabei. Wir bringen Ihren Beitrag an eine noch größere Zielgruppe!

  @alphacooling.professional
Oder per E-Mail an erfahrungen@alphacooling.de



HA COO

Kälteanwendung meine alte Freude am Leben zurück, meinem Bein geht es viel besser und das OHNE GIFT UND MEDIKAMENTE 🙌💪

Ich kann es JEDEM nur empfehlen. Ich danke heute noch meinem Bekannten für den tollen Tipp!

Ausserdem fühle ich mich bei Familie Holzer in guten Händen und verstanden 🙌!!

#Alpha-Cooling
#schmerzfrei



Damit haben wir nicht gerechnet!!!!

#POSTCOVID

Ich litt seit meiner COVID 19 Erkrankung über 6 Monate dauerhaft an heftigen Gelenk-, Glieder- und Muskelschmerzen in beiden Beinen. Die verordneten Schmerzmittel (IBU 400/600) und weitere ärztlich verordnete Anwendungen (das ist nicht als Vorwurf an die Ärzte zu verstehen) haben keine Linderung gebracht. Durch meinen Physiotherapeuten wurde ich auf die ACP Therapie aufmerksam gemacht. Nach 2 ACP Behandlungen mit jeweils 6 Kälte-Einheiten binnen 2 Wochen sind die Schmerzen vollständig weg. Ich genieße die Zeit ohne Schmerzmittel und kann endlich wieder „durchschlafen“. Erlittene stärkere Blutergüsse und Prellungen aus sportlichen Verletzungen heilen dank der ACP Behandlung deutlich schneller als bisher ab. Vor der ACP Behandlung dauerte die Abschwellung bis zu 14 Tagen, in Verbindung mit der ACP Therapie sind diese jetzt nach 3-5 Tagen abneheilt

#postcovid
#alphacooling
#kryotherapie



@VITALPUNKT.HOLZER

WOW was für eine Energie da im Körper entsteht ich fühle mich sowas von Vital und was das Beste ist seid langem da erstmal Schmerzfrei und die

Vera Wachter empfiehlt **Vitalpunkt Holzer.**
Am Di. um 18:20

Steffi und Thomas kenne ich schon lange als sehr sympathische und emphatische Menschen. Als mir beide vor einiger Zeit von ihrem neuen Projekt erzählten, war ich total neugierig. Mir fehlte lediglich der passende Anlass es selber auszuprobieren. Letzte Woche habe ich es geschafft mich mit zwei Kiessäcken zu verheben und ZACK Hexenschuss. 😊 Endlich einen Grund für eine Besuch bei Steffi und Thomas und testen. 🍀

Was soll ich sagen...ich kann es beinahe nicht glauben. So einfach.... nur sitzen und Hände hinhalten und ZACK sind die Schmerzen weg. 😊👍Sofa sitzen geht wieder, Aufstehen ohne Schmerz, bücken, heben, tanzen und vor Freude singen 😊😁...alles möglich und der Schmerz ist weg. Eine Anwendung..unglaublich und fantastisch 😊Ein Geschenk für die Gesundheit und das Wohlbefinden. 🍀🍀Bin ich froh und dankbar, dass ich diese Möglichkeit kennen lernen durfte und weiß jetzt wo ich beim nächsten Schmerz hingehen werde. 🙌🙌🙌Danke ihr Lieben 🙏

FIT ME UP by Sven Höveler ist in Beckum.
1. März

-Gisela B., 69 Jahre, Rheumapatientin aus Hamm 🍀🍀
Gisela leidet seit Jahren unter starken Schmerzen und ist dadurch natürlich im Alltag auch extrem eingeschränkt gewesen und war sehr antriebslos.

Nach 3x Behandlungen Alpha Cooling, dann eine unfassbare Wende!!

O-Ton Gisela: " Ich bin heute Morgen zum ersten Mal seit Jahren ohne Schmerzen aufgestanden, hatte Energie und konnte zum ersten Mal seit Wochen wieder mit meinem Hund spazieren gehen. Ich weiss gar nicht was mit mir ... **Mehr anzeigen**



Lena 12:45

Heute

Ich hatte seit über einem Jahr mehrmals im Monat starke Migräneanfälle mit allem was dazu gehört. 😞😞 Ich bin aus der Not heraus (sehr skeptisch der Therapie gegenüber) mit massiven Kopfschmerzen und Übelkeit zu meiner ersten Alphacooling-Sitzung gefahren. Schon unmittelbar nach der Sitzung hörten die Kopfschmerzen und Übelkeit auf. Und auch die Regelmäßigkeit der Anfälle hat seitdem nachgelassen. Einmal in 4 Monaten... 😊

Ich finde es immer noch total unglaublich!



Ich bin die letzten 2 1/2 Jahren nie richtig schmerzfrei gewesen, jeden Morgen hatte ich durch mein Muskelrheuma eine gewisse Zeit, bis meine Gelenke „Betriebsbereit“ waren.


Ich mache seit 3 Wochen, zweimal die Woche eine Behandlung mit ACP und es wirkt.

An dem Tag der Behandlung ist mir kalt und ich fühle, dass mein Körper richtig zu arbeiten hat. Am anderen Morgen stehe ich auf uns es geht mir gut, deutlich weniger Schmerzen und Anlaufschwierigkeiten. Das ist ein richtig tolles Gefühl. Vor einer Woche bin ich gestürzt und habe mich am Daumen- und Handgelenk gezerrt. Auch hier waren nach der ACP-Behandlung die Schmerzen weg. Für mich ist ACP eine tolle Sache.

Liebe Angela, jetzt muss ich Dir unbedingt ein paar Zeilen schicken. Ich bin total begeistert von Deiner Eis-Maschine 😊

„Alpha-Cooling“ Mein Drehschwindel hat sich nach der 6 Behandlung zu 90% in Luft aufgelöst. Unglaublich. Werde weiterhin zu Dir kommen, damit ich schwindelfrei das Leben hier auf Mallorca genießen kann. 😊😊

Danke, danke, danke noch mal, dass ich diese Möglichkeit habe und das bei dir nutzen kann. Dicke Umarmung und liebe Grüße Sabina 🤗🤗🤗

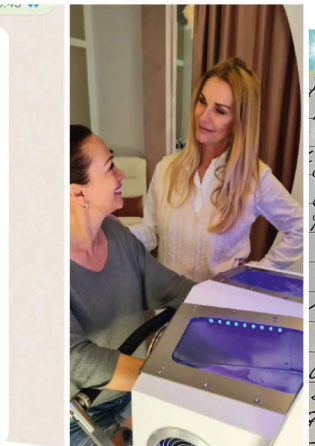

Heute

Guten Morgen Du Liebe, ich wollte Dir kurz ein Feedback geben: Gersten Abend bin ich das erste mal nach langer Zeit OHNE Ischiasschmerzen und Voltaren Schmerzmittel ins Bett gegangen 😊

Ich danke Dir von Herzen für die Zeit, die Du Dir für mich genommen hast. Das AlphaCooling ist super!!!!

Einen tollen und erfolgreichen Tag für Dich 😊😊



Nathalie Rudolph
3 Rezensionen

★★★★★ vor 1 Tag **NEU**

Hier muss ich mal etwas richtig gutes Empfehlen:

Seit Samstag habe ich bereits das neue Gerät Alpha cooling im Salon Larsen skincare auf Mallorca mehrmals nutzen dürfen. Die Verbesserung meines verspannten Nackens nach 8 Behandlungen ist unglaublich. Meine Kopfschmerzen, durch meine Wetterfühligkeit, konnte ich loswerden. Ich bin total fasziniert von dieser Erleichterung für mein Leben.

Vielen lieben Dank Frau Larsen

Antworten

#Energie

Alpha cooling: Ich habe seit zwei Jahren starke Nervenschmerzen an Füßen und Beinen Händen und rücken... kann als Handwerker dadurch nur circa 70% Schmerzen bei Körperliche Arbeit die Lebensqualität ist dabei auf einem Rekordtief. Außerdem leide ich dadurch an großer Erschöpfung. Die Behandlung geholfen die Energie wurde sehr mental angehoben. Der mentale Zustand wurde auch schnell angehoben. Die Energie im ganzen Körper fließt viel besser fühle mich viel fitter ausdauernder. Die Schmerzen im Oberkörperbereich sind um ca 60% besser geworden an den Füßen bei Belastung bis jetzt leider nur etwas geringer besser geworden aber das ist doch auch schon viel. Ich werde wenn es so weitergeht weiterhin Wert im Moment liegt in der großen Verarbeitung der Schmerzen im besseren Wohlbefinden sprich auch die Die Familie Holzer vom vital. Ist sehr parallel dazu unterstütze ich die Heilung die Behandlung gibt einem Hoffnung und macht einen schmerzfreier vielen Dank Mike

#vitalpunktholzer

94
98
90
86
89
78
83
95
102
90
84
86
75
72



ALPHA COOLING®
ACADEMY

www.alphacooling.de/academy